



FIBA

MUISCA:AIRE

TALENT

LENTES DE CONTACTO

LENTE INTER-LIMBAL

FIBA es un diseño lente inter-limbal que puede ser adaptado fácil, ágil y rápidamente en córneas irregulares y regulares. La caja de prueba de lentes corneales **FIBA** permite tener al alcance del profesional, las más acertadas opciones de lentes para realizar una correcta adaptación.

CONTENIDO

La caja de lentes diagnósticos gas permeables **FIBA** contiene 12 lentes multicurvos con diferente curva base. Estas bases van de 6.60 mm a 8.80 mm en pasos de 0.20 mm, para obtener la mejor relación ojo-lente.

NUESTROS
NUEVOS DISEÑOS
SON
COLOMBIANOS

(TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE
PLASMÁTICO)

PASO .01

Determinar la curva base:

QUERATOMETRÍA

- Convierta la K más plana de la queratometría en mm
- Seleccione el lente diagnóstico cuyo valor de curva base sea más plano al valor de la K más plana.

Ejemplo:

42.50 / 46.50 X 0°

42.50 (K más plana) = 7.94 mm

Valor de CB más plano = 8.00 mm

TOPOGRAFÍA:

- Ubíquese en la zona de los 5 mm e identifique el valor dióptrico más plano. Este valor conviértalo en mm.
- Seleccione el lente diagnóstico cuyo valor de curva base sea más plano al valor dióptrico de la topografía.

Ejemplo:

45.00 / 47.25 X 10°

45.00 (K más plana) = 7.50 mm

Valor de CB más plano = 7.60 mm

PASO .02

Evaluar posición, movimiento y fluorograma del lente:

- La posición ideal: Inter-limbal, con leve retención palpebral superior y apoyo en la zona paracentral corneal.
- El movimiento ideal: Leve, aproximadamente de 1-2 mm en cada parpadeo.
- El fluorograma ideal: Homogéneo central, con leve apoyo paracentral y acúmulo de lágrima periférico.
 - > Si el lente no tiene retención o se ubica inferiormente:
 - Siguiendo curva base más plana.
 - > Si el lente presenta excesiva retención o se ubica muy superior:
 - Siguiendo base más ajustada.
 - > Si el paciente expulsa el lente del ojo:
 - Siguiendo base más ajustada.
 - > Si encuentra burbujas y estas se salen en cada parpadeo, no hay problema, el diseño permite un buen intercambio lagrimal. Si las burbujas no salen:
 - Siguiendo base más plana.

PASO .03

Realizar Sobre refracción

PASO .04

Pedir lente definitivo

Se debe enseñar al paciente ejercicios de parpadeo. La superficie del lente corneal FIBA debe estar perfectamente limpia y lubricada, esto optimizará la calidad de AV y la comodidad.

Si presenta alguna duda o inquietud, comuníquese con nosotros.

CR. 13 N. 118-33 PBX. 7454445 CEL. 310 5772285 WWW.ITAL-LENT.COM